


Benutzerhandbuch DemoPack

Revision: 02 — Datum: Mai 2021

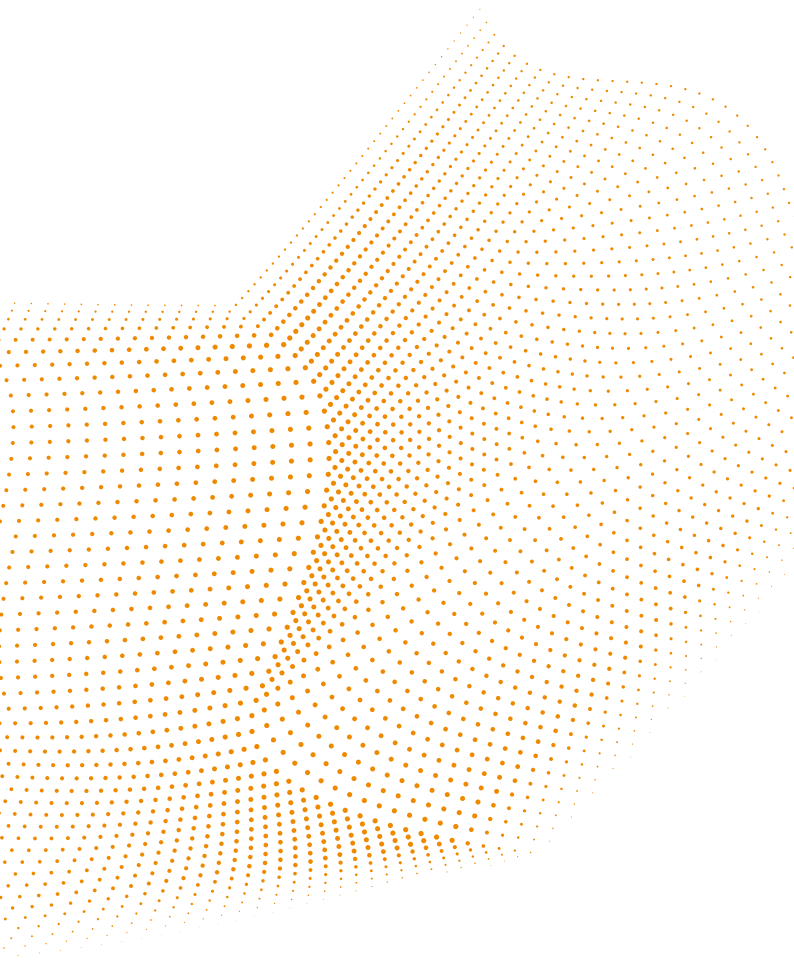

Benutzer-id:		#45
produkt-nr:		
Datum der Herstellung:		

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Benutzung und Pflege	4
	2.1 Steuerung des DemoPack	5
	2.2 Wartung, Pflege und Reinigung	5
	2.3 Batterie	6
3	Service & Garantie	6
	3.1 Service	6
	3.2 Garantie	7
4	Sicherheit/Vorsichtsmaßnahmen	7
5	Entsorgung	8
6	Technische Informationen	8
7	Qualitätssicherung	9
8	Benutzerinformationen	9

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Hy5 DemoPack entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die richtige Verwendung und Handhabung Ihres DemoPack.

Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenden Sie sich an Hy5, wenn Sie Fragen haben oder Probleme auftreten.

DemoPack ist ein Gerät zur Demonstration der Funktion einer MyHand Handprothese. Eine MyHand Handprothese kann über die Schnellkupplung an das DemoPack angeschlossen werden und anschließend über zwei Bedientasten bedient werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen Akku, der sich im Hauptkörper des DemoPack befindetet.


Das DemoPack ist für jede Person gedacht, die eine MyHand Handprothese vorführen möchte.


2. BENUTZUNG & PFLEGE

Ihr DemoPack wird direkt aus der Verpackung heraus betriebsbereit geliefert. Obwohl das Gerät vorgeladen ausgeliefert wird, kann für eine optimale Funktionalität eine zusätzliche Aufladung erforderlich sein.

Verbinden Sie Ihre Handprothese mit dem DemoPack, indem Sie die Schnellkupplung der Hand auf das DemoPack stecken und um 90 Grad hin und her drehen, damit eine feste Verbindung gewährleistet wird.

 **VORSICHT!** ——— Zum Laden darf nur das mit dem DemoPack mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.

 **VORSICHT!** ——— Wenn Ihr DemoPack nicht so funktioniert, wie es sollte, trennen Sie Ihre Prothese und kontaktieren Sie Ihren DemoPack-Lieferanten.

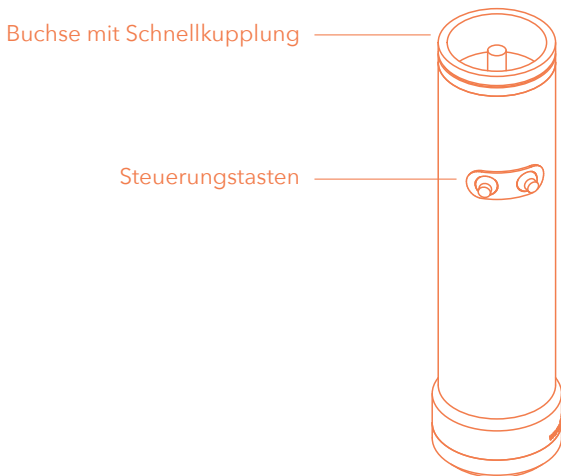

2.1 Steuerung des DemoPacks

An der Seite des DemoPack befinden sich zwei Tasten. Diese Tasten steuern die Bewegung der Handprothese im angeschlossenen Zustand.

Wenn die Bewegungen Ihrer Handprothese langsamer werden oder sich die Prothese gar nicht bewegt, trennen Sie Ihre Prothese, laden Sie Ihr DemoPack und versuchen Sie es nach dem Laden erneut.

2.2 Wartung, Pflege und Reinigung

Bitte überprüfen Sie Ihr DemoPack regelmäßig. Achten Sie besonders darauf, sowohl den elektrischen Schnelltrennstift als auch die Steuertasten auf Verschleiß oder Beschädigung zu überprüfen. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu justieren, es auseinander zu nehmen, es zu warten oder zu modifizieren.


Das DemoPack ist ein elektrisches Gerät und sollte daher nicht in Wasser getaucht werden oder mit Wasser in Berührung kommen. Sollte dies geschehen, ist ein Produktausfall wahrscheinlich.


Verwenden Sie zur Reinigung Ihres DemoPack ein feuchtes Tuch.

2.3 Batterie

Das DemoPack wird von einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie mit 7,4 V und 5200 mAh betrieben, die sich im Hauptgehäuse des Produkts befindet. Ihr DemoPack sollte nicht für längere Zeit in direktem Sonnenlicht liegen. Für Produkte, die Lithium-Batterien enthalten, sind Versandbeschränkungen zu beachten.

Ihr DemoPack sollte nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden.

 **VORSICHT!** — Verwenden Sie das DemoPack nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Das DemoPack darf nicht einer Umgebung unter -10 Grad Celsius oder über +40 Grad Celsius ausgesetzt werden. DemoPack darf nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden.

 **VORSICHT!** — Der Akku muss aufgeladen werden, wenn die Geschwindigkeit der Bewegung deutlich nachlässt. Wenden Sie sich an Ihren DemoPack-Anbieter, wenn der Akku nicht geladen wird. Tauschen Sie die Batterien nicht selbst aus.

3. SERVICE & GARANTIE

3.1 Service

Auf Grund von Verschleiß oder verminderter Leistung müssen mit der Zeit der Akku und der elektrische Schnellkupplungsstift ausgetauscht werden. Alle Reparaturen oder Servicearbeiten sollten nur von Hy5-Personal durchgeführt werden.

3.2 Garantie

Das DemoPack wird mit einer 1-Jahres-Standardgarantie geliefert. Die Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch während der Garantiezeit ab. Die 1-Jahres-Garantiezeit beginnt mit der Inbetriebnahme des Produkts, die nicht später sein sollte als 6 Monate ab dem Datum der Produktauslieferung aus der Produktionsstätte von Hy5, Norwegen.

Als Ingebrauchnahme gilt das Datum der Auslieferung an den Behandler/Endbenutzer. Wenn ein Garantieanspruch geltend gemacht wird, muss dieser Anspruch durch entsprechende Unterlagen, einschließlich Verkaufsnachweis und Versanddatum, belegt werden.

Die Garantie erlischt für alle Systemkomponenten, wenn eine Komponente missbräuchlich verwendet, von einer nicht qualifizierten Person repariert oder gewartet wurde, mutwillig beschädigt oder über die Belastungen hinaus belastet wurde, für die das Produkt ausgelegt ist, oder wenn es verändert oder vernachlässigt wurde.

4. SICHERHEIT/VORSICHTSMASSNAHMEN

Hy5 übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

- Setzen Sie das DemoPack keinen übermäßigen Belastungen aus
- Nicht in Wasser verwenden
- Verwenden Sie DemoPack nicht für extreme Aktivitäten, die zu Verletzungen führen können
- Nicht in übermäßiger Weise Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Staub, Vibration, oder Stößen aussetzen
- Nicht Temperaturen unter -10 °C oder über $+40\text{ °C}$ aussetzen
- Nicht den Flammen aussetzen
- Nicht in explosionsgefährdete Bereiche einbringen
- Komponenten nicht demontieren oder in irgendeiner Weise modifizieren
- Wartung, Reparaturen und Upgrades dürfen nur von Hy5-Personal und von Hy5 zugelassenen technischen Partnern durchgeführt werden
- Versenden Sie das Produkt nicht, ohne den Kurier darüber zu informieren, dass das Produkt Lithiumbatterien enthält

5. ENTSORGUNG



Das DemoPack-Produkt ist so konstruiert, dass es am Ende seiner Lebensdauer für das Recycling vollständig zerlegt werden kann. Eine Entsorgung, die nicht den Vorschriften Ihres Landes entspricht, kann schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben. Bitte beachten Sie die Vorschriften Ihrer nationalen Behörde für das Recycling und die Entsorgung von Abfallstoffen.

6. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hauptabmessungen

Gewicht	540g
Abmessungen	50x50x210mm

Batterie

Maximaler Betriebsstrom	5A
Spannung	7.4V
Akkutyp	Lithium-Akku, 5200mAh

Umgebungsbedingungen

Lagerung und Transport Originalverpackung	-10°C to +40°C / 14F to +104F
Lagerung und Transport ohne Verpackung	-10°C to +40°C / 14F to +104F
Bedienung	siehe MyHand-Benutzerhandbuch

7. QUALITÄTSSICHERUNG

DemoPack ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen, die besagt, dass es die Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EU über elektrische Geräte, der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte erfüllt.

8. BENUTZERINFORMATIONEN

Die Angabe der folgenden Basisinformationen ermöglicht eine einfache Identifizierung bei zukünftigen Serviceanfragen.

Datum der ersten Verwendung:

DemoPack-Seriennummer:



WEEE

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten




CE-Zeichen

Konformitätserklärung gemäß den geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften



Gesetzlicher Hersteller

Hy5Pro AS, Raufoss Industripark, Bygning 100, 2830 Raufoss, NORWAY

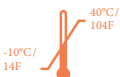

Grenzwert der Lagertemperatur:

-10°C/14F to +40°C/+104F

