

Qualität und Funktion

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Schraub-Adaption
A22, A23, A25
M36-Adapter A87



Rev.1-2021-09_A22,A23,A25,A87_101731



Uniprox GmbH & Co.KG
H.-Heine-Str.4
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. +49 (0) 36628-66-33 00
Fax +49 (0) 36628-66-33 55
E-Mail info@uniprox.de





**Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen.
Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise.
Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.**

1. Zweckbestimmung

Die Schraubadaptionen verbinden Adapter mit Pyramide oder Pyramidaufnahme mit einem M36-Innengewinde bzw. einem 30 mm- Rohr in einer Modular-Beinprothese.

2. Technische Daten

2.1 A22 Schraub-Adaption

- Mit M36 x 1,5 Gewinde und Pyramide
- Wasserfest



Bestell-Nr.	Ausführung	Gewichtslimit	Gewicht	Artikelnummer
A22-St	Stahl	< 125 kg	70 g	4 114 090 99 22 000
A22-Ti	Titan	< 150 kg	40 g	4 114 090 99 33 000

2.2 A23 Schraub-Adaption

- Mit M36 x 1,5 Gewinde und Pyramidaufnahme
- wasserfest*
- Pyramidaufnahme hat einen Standard-Kugelabschnitt mit Ø 50 mm



Bestell-Nr.	Ausführung	Gewichtslimit	Gewicht	Artikelnummer
A23-St	Stahl	< 150 kg	78 g	4 114 090 77 22 000
A23-Ti	Titan	< 100 kg	51 g	4 114 090 77 33 000

* mit speziell wasserfest beschichteten Schrauben; nicht im Lieferumfang enthalten

2.3 A25 Schraub-Adaption

- mit M36 x 1,5 Gewinde und Rohrklemmung Ø 30 mm
- Gewichtslimit: 100 kg



Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht	Artikelnummer
A25-Ti	Titan	69 g	4 114 090 88 33 000

2.4 A87 M36-Adapter

- Mit durchgehendem M36 x 1,5 Gewinde und Pyramidaufnahme
- Gewichtslimit: 150 kg
- wasserfest*



Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht	Artikelnummer
A87	Stahl	55 g	4 620 040 00 00 000

* mit speziell wasserfest beschichteten Schrauben; nicht im Lieferumfang enthalten

2.5 Serviceteile

Gewindestifte mit Innensechskant:

Bestell-Nr.	Gewinde	Länge	Stück pro VE	Artikelnummer
M28-12	M8	12 mm	10	4 226 050 00 00 012
M28-16	M8	16 mm	10	4 226 050 00 00 016

mit wasserfester Beschichtung

Bestell-Nr.	Gewinde	Länge	Stück pro VE	Artikelnummer
E-A11-12	M8	12 mm	4	4 113 018 11 20 612

Zylinderschraube mit Innensechskant

Bestell-Nr.	Gewinde	Länge	Stück pro VE	Artikelnummer
M33	M5	18 mm	10	4 226 030 05 00 018

mit wasserfester Beschichtung

Bestell-Nr.	Gewinde	Länge	Stück pro VE	Artikelnummer
E-A12-20	M5	20 mm	1	4 113 018 12 20 520

3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation von Gliedmaßen der unteren Extremität

Kontraindikationen:

- nicht bekannt

4. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Die Abgabe/Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch orthopädietechnisches Fachpersonal erfolgen.
- Eine unsachgemäße Veränderung oder Anwendung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen ist.
- Die maximalen Gewichtsbelastungen sind unter „2. Technische Daten“ aufgelistet. Zusätzliche Traglasten sind bei der Gewichtsrechnung mit zu berücksichtigen.

6. Verwendung der Gewindestifte

Durch die Gewindestifte M28-12 oder M28-16 sind statische Korrekturen der Prothese jederzeit möglich. Beim Austausch oder Entfernen eines Moduls wird die vorher eingestellte Position beibehalten, wenn nur zwei nebeneinander (nicht gegenüberliegende) Gewindestifte herausgedreht werden, welche am tiefsten eingeschraubt sind.



Sollten Gewindestifte bei der Justierposition zu lang (Beschädigung des Schaumstoffüberzuges) oder zu kurz (fehlender Halt) erscheinen, sollten sie durch andere, passende Stifte ersetzt werden.

Zum Anziehen der Gewindestifte Drehmomentschlüssel benutzen.

Anzugsmoment: 12 Nm.



Bei Fertigstellung der Prothese, Gewinde mit Loctite® 222 sichern.

7. Wartung und Reinigung

Im Rahmen der regelmäßigen Prothesenwartung sind die Adapter zu überprüfen.

8. CE-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an Uniprox und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

9. Gewährleistung und Nutzungsdauer

Nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren empfehlen wir den Austausch des Adapters. Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

10. Lagerung und Entsorgung

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden. Es gibt keine besonderen Lagerbestimmungen.

Ihre Fragen richten Sie bitte an:

Technischer Service 0800-001 05 41*
Kundenservice 0800-001 05 40*
Telefax 0800-001 05 45*
E-Mail info@uniprox.de

* kostenfrei innerhalb Deutschlands