

Qualität und Funktion

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Schaftansatz A60
Socket Attachment Block A60



Uniprox GmbH & Co. KG
H.-Heine-Str.4
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. +49 (0) 36628-66-33 00
Fax +49 (0) 36628-66-33 55
E-Mail info@uniprox.de



Rev.3-2021-06_A60_101746



**Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen.
Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise.
Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.**

1. Zweckbestimmung

Die Holzansätze sind für den Einsatz in Beinprothesen konzipiert und werden als Schaftadapter im Laminat des Prothesenschaftes integriert.

2. Technische Daten

- mit Holzoberteil
- inkl. Dummy und M6-Senkkopfschrauben
- wasserfest*
- Gewichtlimit: 100 kg

REF

Bestell-Nr.	Durchmesser	Höhe	Gewicht	Artikelnummer
A60-148	Ø 148 mm	64 mm	320 g	4 114 060 00 77 148
A60-120	Ø 120 mm	64 mm	280 g	4 114 060 00 77 120
A60-30	Ø 120 mm	30 mm	160 g	4 114 060 00 77 030

* mit speziell wasserfest beschichteten Schrauben; nicht im Lieferumfang enthalten

3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation von Gliedmaßen der unteren Extremität

Kontraindikationen:

- nicht bekannt

4. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Die Abgabe/Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch orthopädietechnisches Fachpersonal erfolgen.
- Eine unsachgemäße Veränderung oder Anwendung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen ist.
- Es dürfen nur die zugelassenen Schrauben verwendet werden.
- Die maximalen Gewichtsbelastungen sind unter „2. Technische Daten“ aufgelistet. Zusätzliche Traglasten sind bei der Gewichtsrechnung mit zu berücksichtigen.
- Die maximale Aufbauhöhe des Schaftansatzes beträgt ca. 60 mm. Wenn Sie den Ansatz kürzen, darf die minimale Aufbauhöhe von 30 mm nicht unterschritten werden.
- Sichern Sie den Schaftansatz vor der Anprobe mit einer Glasgewebeerstärkung.
- Bei nicht ausreichender Laminatverstärkung besteht die Gefahr des Ausbrechens des Schaftansatzes A60 aus dem Prothesenschaft.

6. Einbau

- Nach der Anprobe den Übergang vom Schaftansatz zum Schaft beischleifen. Die Größe und Form der vorgegebenen Adapteranschlussfläche darf nicht beschliffen werden.
- Setzen Sie den beiliegenden Dummy auf den Adapter und versiegeln Sie den Schaft zusammen mit Adapter und Dummy.
- Legen Sie zur Verstärkung des Schaftansatzes einen Carbongewebestreifen zirkulär in Ihre Armierung. Bei zu hoher Belastung durch den Patienten müssen Sie den Ansatz mit zusätzlichen Armierungseinlagen verstärken.
- Nach dem Laminieren schleifen Sie das distale Laminat bis auf die Fläche des Dummy plan.
- Entfernen Sie den Dummy. Belassen Sie die seitlichen Laminatkanten, da diese dem Schaftansatz zusätzliche Führung geben.
- Montieren Sie den Adapter mit den beiliegenden Senkschrauben. Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel.

Anzugsmoment: 12 Nm



Eine zusätzliche Schraubensicherung z.B. mit Loctite ist nicht gestattet.



7. Wartung

Im Rahmen der regelmäßigen Prothesenwartung ist der Schaftansatz zu überprüfen.

8. CE-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an Uniprox und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

9. Gewährleistung und Nutzungsdauer

Nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren empfehlen wir den Austausch des Schaftansatzes.

Garantie 6 Monate für Haltbarkeit und Funktion

Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

10. Lagerung und Entsorgung

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden. Es gibt keine besonderen Lagerbestimmungen.

Ihre Fragen richten Sie bitte an:

Technischer Service 0800-001 05 41*

Kundenservice 0800-001 05 40*

Telefax 0800-001 05 45*

E-Mail info@uniprox.de

* kostenfrei innerhalb Deutschlands