

Qualität und Funktion

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

DAHO® Typ 4
DAHO® Typ 4P



Rev.3-2021-05_DAH04+4P



Uniprox GmbH & Co.KG
H.-Heine-Str.4
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. +49 (0) 36628-66-33 00
Fax +49 (0) 36628-66-33 55
E-Mail info@uniprox.de





**Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen.
Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise.
Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.**

1. Zweckbestimmung

Die DAHO®-Handorthesen sind ein modulares Orthesen-System zur Therapieunterstützung nach Operationen, bei Verletzungen oder Erkrankungen im Bereich der Finger und der Hand. Die DAHO®-Handorthesen Typ 4 und Typ 4P sind zur Ruhigstellung des Handgelenks, der Finger- und Daumengelenke vorgesehen.

2. Technische Daten

2.1 DAHO® Typ 4

Lagerungs-Orthese



Bestell-Nr.	Größe	Seite	Artikelnummer
DAH04-SL	S	links	4 501 080 01 01 000
DAH04-ML	M	links	4 501 080 01 02 000
DAH04-LL	L	links	4 501 080 01 03 000
DAH04-XLL	XL	links	4 501 080 01 04 000
DAH04-SR	S	rechts	4 501 080 02 01 000
DAH04-MR	M	rechts	4 501 080 02 02 000
DAH04-LR	L	rechts	4 501 080 02 03 000
DAH04-XLR	XL	rechts	4 501 080 02 04 000

2.2 DAHO® Typ 4P

Lagerungs-Orthese mit Perforierung



Bestell-Nr.	Größe	Seite	Artikelnummer
DAH04P-SL	S	links	4 501 090 01 01 000
DAH04P-ML	M	links	4 501 090 01 02 000
DAH04P-LL	L	links	4 501 090 01 03 000
DAH04P-SR	S	rechts	4 501 090 02 01 000
DAH04P-MR	M	rechts	4 501 090 02 02 000
DAH04P-LR	L	rechts	4 501 090 02 03 000

3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- In der primären Behandlungsphase z.B. Verbrennungen
- Bei akuten Schmerzzuständen
- Physiologische Lagerung nach chirurgischen Eingriffen

Kontraindikationen:

- extreme Deformitäten an Unterarm oder Hand
- extrem kleine oder große Hände
- offene Wunden (ohne Wundversorgung)

4. Nebenwirkungen

Bei langer Tragedauer kann es durch den Kontakt und die Korrekturwirkung der Orthese zu Abdrücken und Reizungen auf der Haut führen.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise




- Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Die Abgabe/Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch orthopädie-technisches Fachpersonal erfolgen.
- Der Patient muss durch den Techniker in die korrekte Benutzung eingewiesen werden.
- Die DAHO®-Handorthese ist ein verordnungsfähiges Produkt, das nach ärztlicher Anleitung getragen werden sollte.
- Die DAHO®-Handorthese sollte nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung und bei den aufgeführten Indikationen getragen werden.
- Bei unsachgemäßer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.
- Bei Überempfindlichkeit der Haut, bei bekannten Kontaktallergien sowie bei Druckempfindlichkeit sollte unter der DAHO®-Handorthese ein Baumwollstrumpf getragen werden.
- Eine unsachgemäße Veränderung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Leistung des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen ist.
- Wenn der Patient außergewöhnliche Veränderungen an sich (z.B. Zunahme der Beschwerden) feststellt, sollte er seinen behandelnden Arzt aufsuchen. Eine Kombination mit anderen Produkten muss vorher mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.
- Bei Leistungsänderung oder Funktionsstörungen der Orthese soll der Patient unverzüglich seinen Techniker oder Arzt aufsuchen.
- Der Kontakt der Orthese mit Wunden und offenen Hautstellen ohne Wundversorgung ist zu vermeiden!

6. Anwendung

6.1 Größenauswahl

Zur Auswahl der passenden Orthesen-Größe wird die Mittelhandbreite auf Höhe der MCP-Gelenke gemessen.

Größe	Mittelhand-Breite
S	bis 7 cm
M	bis 8 cm
L	bis 9 cm
XL	bis 10 cm

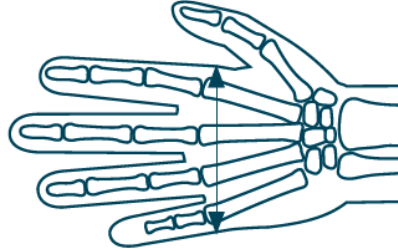

6.2 Anpassung

Die Orthese wird auf der Haut getragen.

Je nach Gegebenheit bedarf die Orthese einer individuellen Anpassung mittels thermoplastischer oder mechanischer Umformung.

- Nachdem die Orthese angepasst wurde, können die beiliegenden Klettverschlüsse angebracht werden.
- Beim Typ 4P besteht höhere Atmungsaktivität durch Lochperforation.

7. Wartung und Reinigung



Die Handorthese kann mit milder Seife und mit handwarmem Wasser abgewaschen werden. Zur Desinfektion sind handelsübliche Desinfektionsmittel zu verwenden.

8. CE-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an Uniprox und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

9. Gewährleistung und Nutzungsdauer

Die maximale Nutzungsdauer der DAHO®-Handorthese beträgt 12 Monate bei täglicher Nutzung. Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

10. Lagerung und Entsorgung

Für die Orthese gibt es keine besonderen Lagerbestimmungen.

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Ihre Fragen richten Sie bitte an:

Technischer Service 0800-001 05 41*

Kundenservice 0800-001 05 40*

Telefax 0800-001 05 45*

E-Mail info@uniprox.de

* kostenfrei innerhalb Deutschlands