

Qualität und Funktion

**Gebrauchsanweisung**  
*Instruction Manual*

**Modular SACH Prothesenfuß-Adapter**  
**E-F01, E-F02, E-F04**



Rev.0-2021-06\_E-F01,E-F02,E-F04\_101700



Uniprox GmbH & Co.KG  
H.-Heine-Str.4  
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. +49 (0) 36628-66-33 00  
Fax +49 (0) 36628-66-33 55  
E-Mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)





**Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise. Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.**

### 1. Zweckbestimmung

Die Modularadapter E-F01, -02 und -04 dienen zur Montage der SACH Füße F1 und F20.

### 2. Technische Daten

- Anschluss: Pyramide mit  $\varnothing$  50 mm Kugelabschnitt
- inkl. Verschraubung (M10)
- inkl. 2-Komponentenkleber
- wasserfest (nur E-F02, E-F04)



Bestell-Nr.	Gewichtslimit	Ausführung	Artikelnummer
E-F01	< 75 kg	Alu M10	4 101 019 99 11 010
E-F02	< 125 kg	Stahl M10	4 101 019 99 22 010
E-F04	< 100 kg	Titan M10	4 101 019 99 33 010

### 3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation von Gliedmaßen der unteren Extremität

Kontraindikationen:

- nicht bekannt

### 4. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### 5. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Die Abgabe/Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch orthopädietechnisches Fachpersonal erfolgen.
- Eine unsachgemäße Veränderung oder Anwendung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen ist.
- Es dürfen nur die zugelassenen Schrauben verwendet werden.
- Die maximalen Gewichtsbelastungen sind unter „2. Technische Daten“ aufgelistet. Zusätzliche Traglasten sind bei der Gewichtsrechnung mit zu berücksichtigen.

### 6. Einbau

Das Anzugsmoment der im Lieferumfang enthaltenen Schraube M10 beträgt 30 Nm.



Bei Fertigstellung der Prothese ist die Schraube mit Loctite 243 zu sichern.



Der SACH-Fuß-Adapter und der SACH-Fuß sind mit dem beiliegenden Kleber zu verkleben.



## **7. Wartung**

Im Rahmen der regelmäßigen Prothesenwartung ist der Schaftansatz zu überprüfen.

## **8. CE-Konformität**

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an Uniprox und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

## **9. Gewährleistung und Nutzungsdauer**

Nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren empfehlen wir den Austausch des Adapters. Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

## **10. Lagerung und Entsorgung**

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden. Es gibt keine besonderen Lagerbestimmungen.

### **Ihre Fragen richten Sie bitte an:**

Technischer Service 0800-001 05 41\*

Kundenservice 0800-001 05 40\*

Telefax 0800-001 05 45\*

E-Mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)

\* kostenfrei innerhalb Deutschlands