


Qualität und Funktion

**Gebrauchsanweisung**  
*Instruction Manual*

**ST89, ST90, ST91**  
**Nylon-Schutzhüllen**  
*ST89, ST90, ST91*  
***Nylon Protective Sheaths***



---

 Laboratori Piazza, via Dunant, 25  
46040 Guidizzolo (MN), Italy



---

**Distributed by:**  
Uniprox GmbH & Co.KG, H.-Heine-Str.4, 07937 Zeulenroda-Triebes

Ein Unternehmen der Bauerfeind Gruppe – [www.uniprox.de](http://www.uniprox.de)

Rev.2-2021-12\_ST89,ST90,ST91

unique prosthetic solutions  
A company of the Bauerfeind Group

 **uniprox**<sup>®</sup>



Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise. Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.

### 1. Zweckbestimmung

ST89, ST90, ST91 Schutzhüllen dienen dem Hautschutz von Amputationsstümpfen.

### 2. Technische Daten

#### 2.1 ST89: Obere Weite 16 cm



Bestell-Nr.	Länge	Artikelnummer
ST89-30	30 cm	4 236 230 02 00 030
ST89-35	35 cm	4 236 230 02 00 035
ST89-40	40 cm	4 236 230 02 00 040
ST89-45	45 cm	4 236 230 02 00 045
ST89-50	50 cm	4 236 230 02 00 050
ST89-55	55 cm	4 236 230 02 00 055
ST89-60	60 cm	4 236 230 02 00 060

#### 2.2 ST90: Obere Weite 18 cm



Bestell-Nr.	Länge	Artikelnummer
ST90-30	30 cm	4 236 230 03 00 030
ST90-35	35 cm	4 236 230 03 00 035
ST90-40	40 cm	4 236 230 03 00 040
ST90-45	45 cm	4 236 230 03 00 045
ST90-50	50 cm	4 236 230 03 00 050
ST90-55	55 cm	4 236 230 03 00 055
ST90-60	60 cm	4 236 230 03 00 060

#### 2.3 ST91: Obere Weite 20 cm



Bestell-Nr.	Länge	Artikelnummer
ST91-30	30 cm	4 236 230 04 00 030
ST91-35	35 cm	4 236 230 04 00 035
ST91-40	40 cm	4 236 230 04 00 040
ST91-45	45 cm	4 236 230 04 00 045
ST91-50	50 cm	4 236 230 04 00 050
ST91-55	55 cm	4 236 230 04 00 055
ST91-60	60 cm	4 236 230 04 00 060

### 3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation der unteren Extremität

Kontraindikationen:

- Bei Hautunverträglichkeiten zu Nylon Textilien
- Bei offenen Geschwüren, Dermatitis, Erythemen, Nekrose

### 4. Nebenwirkungen

Derzeit sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### 5. Allgemeine Sicherheitshinweise



Von Lichtquellen, Hitze und Feuchtigkeit fernhalten. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

### 6. Reinigung



Die Schutzhüllen können bei 40°C in der Waschmaschine gereinigt werden.



### **7. CE-Konformität**

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an *Uniprox* bzw. den Hersteller *Laboratori Piazza* sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

### **8. Gewährleistung**

Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

### **9. Entsorgung**

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden.

### **Ihre Fragen richten Sie bitte an:**

Technischer Service 0800-001 05 41\*  
Kundenservice 0800-001 05 40\*  
Telefax 0800-001 05 45\*  
E-Mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)

\* kostenfrei innerhalb Deutschlands