

## Symbol-Legende Icon Legend


|  |  |
|--|--|
|  Achtung<br><i>Attention</i>   |  Europäischer Bevollmächtigter<br><i>European Authorized Representative</i> |
|  Artikelnummer<br><i>Article number</i>  |  CE-Kennzeichnung<br><i>CE marking</i>                                      |
|  einzelner Patient-<br>mehrfach anwendbar<br><i>single patient-<br/>multiple use</i> |  Übersetzung<br><i>Translation</i>  |
|  Reinigung<br><i>Cleaning</i>  |  Vertriebspartner<br><i>Distributor</i>                                     |
|  Hersteller<br><i>Manufacturer</i>   |  Importeur<br><i>Importeur</i>  |
|  Nicht bleichen<br><i>Do not bleach</i>  |  Keine chemische Reinigung<br><i>No chemical cleaning</i>                   |
|  Nicht bügeln<br><i>Do not iron</i>  |  Nicht im Trockner trocknen<br><i>Do not tumble-dry</i>                     |

Qualität und Funktion

## Gebrauchsanweisung Instruction Manual

### ST89, ST90, ST91 Nylon-Schutzhüllen *ST89, ST90, ST91* Nylon Protective Sheaths



 Laboratori Piazza, via Dunant, 25  
46040 Guidizzolo (MN), Italy



 Uniprox GmbH & Co. KG,  
H.-Heine-Str.4,  
07937 Zeulenroda-Triebes

Tätigkeiten nach MDR, Artikel 16: 2a+b /  
*Activity according MDR, Article 16: 2a+b*



Rev. 3-2023-02\_ST89, ST90, ST91



**Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise. Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.**

### 1. Zweckbestimmung

ST89, ST90, ST91 Schutzhüllen dienen dem Hautschutz vor Reizungen und Entzündungen von Amputationsstümpfen, die durch den Kontakt mit der Prothese entstehen. Sie verringern Temperaturschwankungen und absorbieren Schweiß.

### 2. Technische Daten

#### 2.1 ST89: Obere Weite 16 cm



| Bestell-Nr. | Länge | Artikelnummer       |
|-------------|-------|---------------------|
| ST89-30     | 30 cm | 4 236 230 02 00 030 |
| ST89-35     | 35 cm | 4 236 230 02 00 035 |
| ST89-40     | 40 cm | 4 236 230 02 00 040 |
| ST89-45     | 45 cm | 4 236 230 02 00 045 |
| ST89-50     | 50 cm | 4 236 230 02 00 050 |
| ST89-55     | 55 cm | 4 236 230 02 00 055 |
| ST89-60     | 60 cm | 4 236 230 02 00 060 |

#### 2.2 ST90: Obere Weite 18 cm



| Bestell-Nr. | Länge | Artikelnummer       |
|-------------|-------|---------------------|
| ST90-30     | 30 cm | 4 236 230 03 00 030 |
| ST90-35     | 35 cm | 4 236 230 03 00 035 |
| ST90-40     | 40 cm | 4 236 230 03 00 040 |
| ST90-45     | 45 cm | 4 236 230 03 00 045 |
| ST90-50     | 50 cm | 4 236 230 03 00 050 |
| ST90-55     | 55 cm | 4 236 230 03 00 055 |
| ST90-60     | 60 cm | 4 236 230 03 00 060 |

#### 2.3 ST91: Obere Weite 20 cm



| Bestell-Nr. | Länge | Artikelnummer       |
|-------------|-------|---------------------|
| ST91-30     | 30 cm | 4 236 230 04 00 030 |
| ST91-35     | 35 cm | 4 236 230 04 00 035 |
| ST91-40     | 40 cm | 4 236 230 04 00 040 |
| ST91-45     | 45 cm | 4 236 230 04 00 045 |
| ST91-50     | 50 cm | 4 236 230 04 00 050 |
| ST91-55     | 55 cm | 4 236 230 04 00 055 |
| ST91-60     | 60 cm | 4 236 230 04 00 060 |

### 3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation der unteren Extremität

Kontraindikationen:

- Bei Hautunverträglichkeiten zu Nylon Textilien
- Bei offenen Geschwüren, Dermatitis, Erythemen, Nekrose

### 4. Nebenwirkungen

Derzeit sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### 5. Allgemeine Sicherheitshinweise



Von Lichtquellen, Hitze und Feuchtigkeit fernhalten. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

### 6. Reinigung



Die Schutzhüllen können bei 40°C in der Waschmaschine gereinigt werden.



### **7. CE-Konformität**

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an *Uniprox* bzw. den Hersteller *Laboratori Piazza* sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

### **8. Gewährleistung**

Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

### **9. Entsorgung**

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden.

#### **Ihre Fragen richten Sie bitte an:**

Technischer Service 0800-001 05 41\*

Kundenservice 0800-001 05 40\*

Telefax 0800-001 05 45\*

E-Mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)

\* kostenfrei innerhalb Deutschlands