

Qualität und Funktion

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Modular SACH Prothesenfuß-Adapter
E-F01, E-F02, E-F04
Modular SACH foot adapter
E-F01, E-F02, E-F04



Rev.0-2021-06_E-F01,E-F02,E-F04_101700

 Uniprox GmbH & Co.KG
H.-Heine-Str.4
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. +49 (0) 36628-66-33 00
Fax +49 (0) 36628-66-33 55
E-Mail info@uniprox.de





Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise. Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.

1. Zweckbestimmung

Die Modularadapter E-F01, -02 und -04 dienen zur Montage der SACH Füße F1 und F20.

2. Technische Daten

- Anschluss: Pyramide mit \varnothing 50 mm Kugelabschnitt
- inkl. Verschraubung (M10)
- inkl. 2-Komponentenkleber
- wasserfest (nur E-F02, E-F04)

REF

Bestell-Nr.	Gewichtslimit	Ausführung	Artikelnummer
E-F01	< 75 kg	Alu M10	4 101 019 99 11 010
E-F02	< 125 kg	Stahl M10	4 101 019 99 22 010
E-F04	< 100 kg	Titan M10	4 101 019 99 33 010

3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation von Gliedmaßen der unteren Extremität

Kontraindikationen:

- nicht bekannt

4. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Die Abgabe/Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch orthopädietechnisches Fachpersonal erfolgen.
- Eine unsachgemäße Veränderung oder Anwendung am Produkt darf nicht vorgenommen werden. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion des Produktes beeinträchtigt werden, so dass eine Produkthaftung ausgeschlossen ist.
- Es dürfen nur die zugelassenen Schrauben verwendet werden.
- Die maximalen Gewichtsbelastungen sind unter „2. Technische Daten“ aufgelistet. Zusätzliche Traglasten sind bei der Gewichtsrechnung mit zu berücksichtigen.

6. Einbau



Das Anzugsmoment der im Lieferumfang enthaltenen Schraube M10 beträgt 30 Nm.



Bei Fertigstellung der Prothese ist die Schraube mit Loctite 243 zu sichern.

Der SACH-Fuß-Adapter und der SACH-Fuß sind mit dem beiliegenden Kleber zu verkleben.



7. Wartung

Im Rahmen der regelmäßigen Prothesenwartung ist der Schaftansatz zu überprüfen.

8. CE-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an Uniprox und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

9. Gewährleistung und Nutzungsdauer

Nach einer Nutzungsdauer von 5 Jahren empfehlen wir den Austausch des Adapters.

Garantie 6 Monate für Haltbarkeit und Funktion.

Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

10. Lagerung und Entsorgung

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden. Es gibt keine besonderen Lagerbestimmungen.

Ihre Fragen richten Sie bitte an:

Technischer Service 0800-001 05 41*

Kundenservice 0800-001 05 40*

Telefax 0800-001 05 45*

E-Mail info@uniprox.de

* kostenfrei innerhalb Deutschlands