


Qualität und Funktion

**Gebrauchsanweisung**  
*Instruction Manual*



**Silikon-Kontaktkissen (L14, L15)**  
**Distal-Cup (L01)**  
**Silikon-Liner (L03, L20)**  
*Silicone Distal End Pad (L14, L15)*  
*Distal-Cup(L01)*  
*Silicone-Liner (L03, L20)*

Rev.3-2021-05\_L01,L14,L15,L03,L20\_101744

 Uniprox GmbH & Co.KG  
H.-Heine-Str.4  
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. +49 (0) 36628-66-33 00  
Fax +49 (0) 36628-66-33 55  
E-Mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)





**Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfältig zu lesen.  
Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise.  
Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.**

## 1. Zweckbestimmung

Die Silikonprodukte (L01, L03, L14, L15, L20) dienen der Bettung des Stumpfes.

## 2. Technische Daten

### 2.1 Distal Cup

- Wandstärke distal: 6 mm, proximal auslaufend
- Länge: 150 mm
- weiches, transparentes Silikon

**REF**

Bestell-Nr.	Umfang unten in cm	Größe Liner	Artikelnummer
L01-6	6	14	4 143 070 00 00 060
L01-7	7	16	4 143 070 00 00 070
L01-9	9	18	4 143 070 00 00 090
L01-11	11	20 / 21	4 143 070 00 00 110
L01-12	12	22	4 143 070 00 00 120
L01-14	14	23,5	4 143 070 00 00 140
L01-16	16	25	4 143 070 00 00 140
L01-17	17	26,5	4 143 070 00 00 170
L01-19	19	28	4 143 070 00 00 190
L01-20	20	30	4 143 070 00 00 200
L01-22	22	32	4 143 070 00 00 220

## 2.2 Silikon – Kontaktkissen

Stumpfen-Belastungskissen für Knieex, konvex (für Fossa interkondylaris)

**REF**

Bestell-Nr.	Umfang Kondylus in cm	Artikelnummer
L14-1	31 – 36	4 156 020 01 00 360
L14-2	38 - 40	4 156 020 01 00 400

Stumpfen-Belastungskissen für Knieex, konkav

**REF**

Bestell-Nr.	Umfang Kondylus in cm	Artikelnummer
L15-1	31 – 36	4 156 020 02 00 360
L15-2	38 - 40	4 156 020 02 00 400

## 2.3 Silikon – Liner

- Wandstärke: 2,5 mm
- Länge: 350 mm
- L03 - Größen in cm: 16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45
- L20 – Größe in cm: 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45
- weiche Strumpfpolsterung
- transparentes Silikon
- gute Führungseigenschaften des Silikons
- für postoperative Versorgungen geeignet

**REF**

Bestell-Nr.	Distaler Anschluss	Shorehärte	Art. Nr.
L03 - [Größe]	mit	50 Shore A	4 143 010 10 00 xxx
L20 - [Größe]	ohne	50 Shore A	4 143 010 00 00 xxx

### 3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

- Amputation von Gliedmaßen
- bei Knieexartikulation (L14, L15)
- als Volumenausgleich bei sehr konischen Stümpfen (L01)

Kontraindikationen:

- Eigenschweißallergien
- Nicht verheilte und problematische Amputationswunden
- Hautnekrosen
- Sonstige Hautunverträglichkeiten

### 4. Nebenwirkungen

Durch die Haftung des Silikons auf der Haut und Spannungsbelastung durch Bewegungen kann es bei empfindlicher Haut zu Reizungen kommen. Zum Hautschutz empfehlen wir fettfreie Pflegemittel, wie PS06 Allpremed® hydro INTENSIV.

### 5. Allgemeine Sicherheitshinweise



- Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten vorgesehen.
- Die Abgabe/Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch orthopädietechnisches Fachpersonal erfolgen.
- Der Patient muss durch den Techniker in die korrekte Benutzung eingewiesen werden.
- Der Kontakt der Silikonprodukte mit Wunden und offenen Hautstellen ist zu vermeiden!
- Wählen Sie in keinem Fall eine höhere Linergröße als das gemessene Umfangsmaß!
- Den Liner nicht wie einen Strumpf anlegen!
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Silikons durch Fingernägel!
- Die Silikonprodukte dürfen nicht im Wäschetrockner, sondern ausschließlich mit einem fusselfreien Handtuch getrocknet werden.
- Bitte beachten Sie, dass viele Seifen, Deodorants, Parfüme, Aerosole und Alkoholsprays zu Hautirritationen führen können!
- Keine fetthaltigen Cremes zur Hautpflege während der Nutzung verwenden!
- Den Liner nicht auf links gedreht lagern, da das Silikon einreißen kann. Wir empfehlen die Nutzung des Linerständers E-LSG.
- Zum leichteren Anziehen auf der Außenseite des Liners ein geeignetes Gleitmittel (z.B. Isopropylalkohol) auftragen.

### 6. Anwendung

#### 6.1 Distal - Cup

*Größenauswahl*

Zur Auswahl der passenden Größe des Distal-Cups wird das Umfangsmaß 4 cm oberhalb des distalen Stumpfendes gemessen.

*Überziehen des Distal-Cups*

Vor dem Anlegen wird der Distal-Cup nach links gedreht. Dazu ist es von Vorteil, die Außenseite mit Wasser leicht rutschig zu machen. Stülpen Sie das distale Ende des Distal-Cups möglichst weit nach außen und setzen Sie es ohne Lufteinschluss auf das Stumpfende. Achten Sie darauf, dass der Distal-Cup mittig auf dem Stumpfende sitzt. Schieben Sie nun den Distal-Cup vorsichtig über den Stumpf. Trocknen Sie nun den Distal-Cup wieder gut von außen ab und ziehen Sie anschließend den Silikon-Socket in gewohnter Weise über den Distal -Cup und Ihren Stumpf.

#### 6.2 Silikon-Kontaktkissen

*Größenauswahl*

Umfang des Kondylus

*Anwendung*

Wird distal in die Stumpfbettung eingelegt und kann ggf. mit Silikonkleber (z.B. M22-0,1) fixiert werden.

#### 6.3 Silikon-Liner

Zur Auswahl der passenden Größe des Liners wird das Umfangsmaß 4 cm oberhalb des distalen Stumpfendes gemessen. In der Regel ergibt das gemessene Umfangsmaß abzüglich einer Linergröße das Bestellmaß des Liners (z.B. Umfangsmaß 27 cm -> Linergröße 26,5).

*Beschneiden des Liners*

Der Liner kann individuell nach den Bedürfnissen des Patienten zugeschnitten werden. Es ist empfehlenswert, sich beim Beschneiden langsam der gewünschten Trimmlinie zu nähern. Nutzen Sie möglichst eine Wellenschere.

*Anlegen des Liners*

- Zum leichteren Anziehen auf der Außenseite des Liners ein geeignetes Gleitmittel (z.B. Isopropylalkohol) auftragen.
- Den Liner komplett umstülpen und das innere distale Ende auf das Stumpfende aufsetzen.

- Den Liner mit beiden Händen auf den Stumpf schieben, ohne den Liner dabei nach oben zu ziehen.
- Beim Aufrollen darf keine Luft zwischen Haut und Liner eingeschlossen werden.
- Wenn ein Linerteller vorhanden ist, muss dieser in Verlängerung des Unterschenkelstumpfes ausgerichtet sein. Andernfalls den Liner erneut aufrollen.

### 7. Wartung und Reinigung



Die Silikonprodukte sollten nach jedem Gebrauch, mindestens aber nach eintägiger Benutzung mit einem Silikon-Reiniger oder milder Seife gründlich gereinigt und mit handwarmem Wasser abgewaschen werden.

Die Silikonprodukte sollten regelmäßig auf Beschädigungen (z.B. Risse im Silikon) geprüft werden.

### 8. Stumpfpflege

Der Stumpf muss täglich mit neutraler Seife gründlich gewaschen werden. Insbesondere bei trockener Haut ist zusätzlich die Verwendung einer Hautlotion auf Wasserbasis zur Stumpfpflege zu empfehlen, z.B. PS06 Allpremed® hydro INTENSIV.

### 9. CE-Konformität

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen. Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind an Uniprox und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu melden.

### 10. Gewährleistung und Nutzungsdauer

Nach einer Nutzungsdauer von 6 Monaten empfehlen wir den Austausch des Liners. Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewährleistung gemäß den Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

### 11. Lagerung und Entsorgung

Den Liner nicht auf links gedreht lagern, da das Silikon einreißen kann. Wir empfehlen die Nutzung des Linerständers E-LSG.

Das Produkt kann problemlos über den Hausmüll entsorgt werden.

### Ihre Fragen richten Sie bitte an:

Technischer Service 0800-001 05 41\*

Kundenservice 0800-001 05 40\*

Telefax 0800-001 05 45\*

E-Mail [info@uniprox.de](mailto:info@uniprox.de)

\* kostenfrei innerhalb Deutschlands